

ステラケアCA[®]

透析液清浄化をリードする

特長

- < 殺菌力と炭酸カルシウムスケール除去力を高めた強化タイプです。 >
- バイオフィルム分解成分配合で強固なバイオフィルムも分解除去します。
 - 有機物存在下でも高い除菌力を発揮します。
 - 炭酸カルシウムスケールを強力に除去します。
 - 装置、配管に影響が少ない低腐食性。
 - サビをゆっくり溶解しながら除去、サビの発生しない環境を作ります。
 - すぐれた生分解性。
 - 高希釈倍率で使用でき、安価に効率の良い洗浄が可能です。

成分

- | | |
|---|------------------|
| ● 過酢酸 (CH ₃ COOOH) 4% | 除菌洗浄効果 (除菌 > 洗浄) |
| ● 過酸化水素 (H ₂ O ₂) 6%未満 | 除菌洗浄効果 (洗浄 > 除菌) |
| ● 酢酸 (CH ₃ COOH) 35.5% | 炭酸カルシウムスケールの除去効果 |
| ● 有機酸性化合物 | バイオフィルム分解効果 |

使用方法


- | | |
|--------|---------------------------|
| ● 希釈倍率 | 150倍～350倍希釈 (推奨200倍希釈) |
| ● 封入時間 | 推奨一晩封入 |
| ● 水洗時間 | 60分以上 (残留確認を行ってください) |
| ● 併用薬剤 | 2日以上/週の割合でアルカリ洗浄を行ってください。 |

製品情報

- | | |
|----------|----------------------------|
| ● 容量 | 18L (9L×2本入り) |
| ● pH | 原液 : 1.08
200倍希釈 : 3.02 |
| ● 品質保証期間 | 未開封、常温保存 1年 |
| ● 外観 | 無色透明液体 酢酸臭 |


各種試験結果

炭酸Caスケール除去力

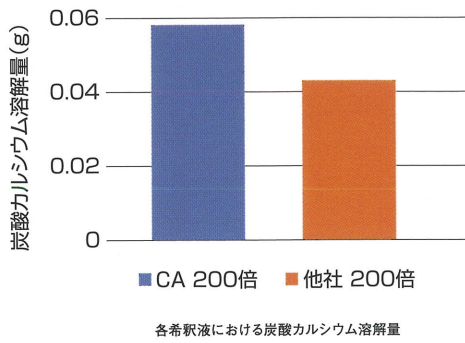


サビ取り試験

200倍希釈時 ステンレス(SUS)外観評価

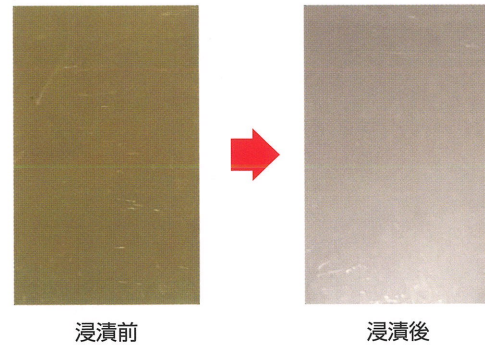


バイオフィーム除去効果

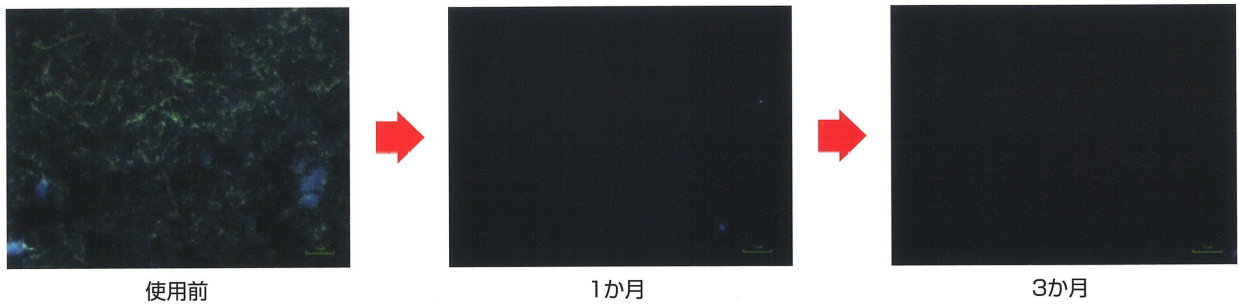

第59回全日本病院学会「過酢酸系洗浄剤『ステラケアR高濃度タイプ』と『キノーサンPA-remo』の性能比較 小松ソフィア病院 一部抜粋

バイオフィームに対する塩素消毒の効果

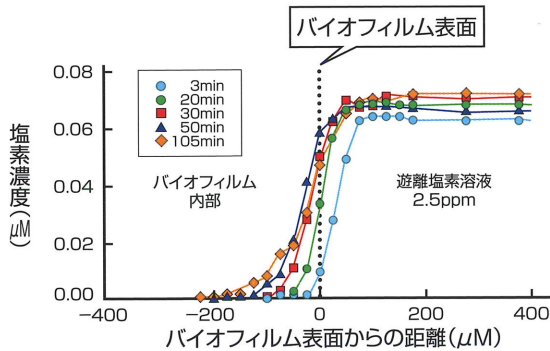

出展: BIOFILMS: The Hypertextbook: Mechanisms of Antimicrobial Tolerance in Biofilms (Montana State University) より一部改変して引用

容器外観写真



〈製造元〉



佐々木化学株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町 1-5-12
 TEL.06-6222-2771(代表) FAX.06-6222-2775
 http://osakasasaki.co.jp
 e-mail: shumma@osakasasaki.co.jp

JANコード



4 573577 080059