

## 電源の切断方法について【ACH-Σ Plus i】


装置は、電源スイッチを5秒以上押し続けることでシャットダウンしますが、5秒未満で電源スイッチから手を離すと、正常にシャットダウンされません。その場合、電源スイッチから手を離すタイミングによっては、画面は消えているにもかかわらず、ブザー音が鳴り続けることがあります。本現象が発生した場合は、再度電源スイッチを5秒以上押し続けることで正常にシャットダウンさせることができます。



シャットダウン時は、画面が消えたことを確認した後、電源スイッチから指を離してください。

## 疎水性エアフィルタの取り付け方法について【ACH-Σシリーズ、プラソートμ】

圧力ポートと疎水性エアフィルタのネジ山が噛みこんだ状態(嵌合不良)で取り付けした場合、プライミング時や治療時の警報発生、リークチェックが通らない(CART選択時)、疎水性エアフィルタが濡れるなどのトラブルの原因となります。弊社装置では、下記手順で疎水性エアフィルタの取り付けを行ってください。

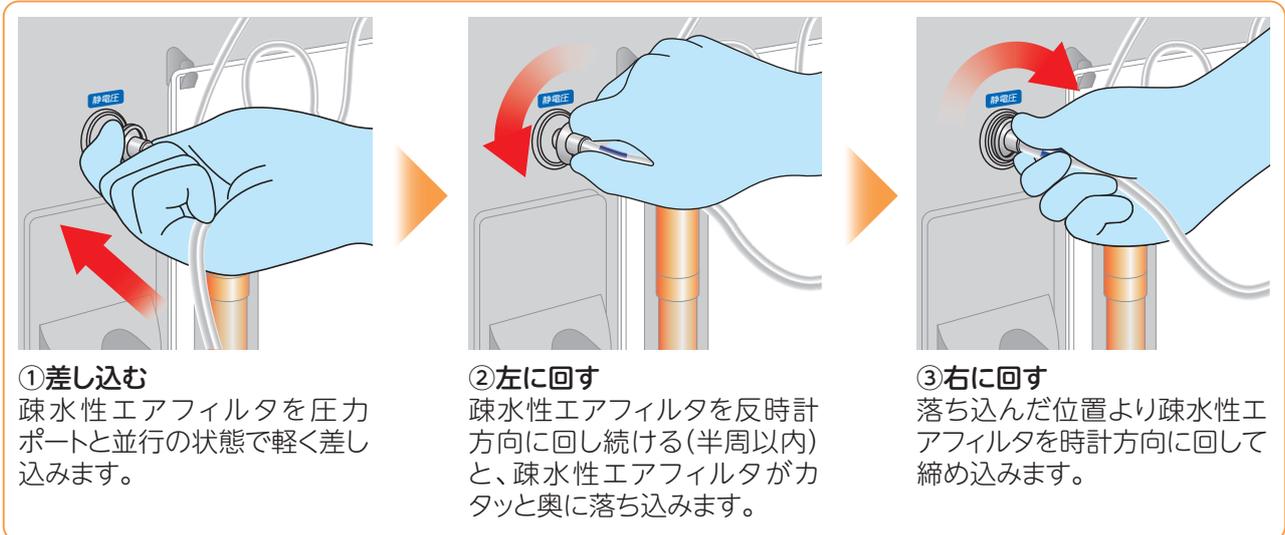

### 重要

疎水性エアフィルタが血液や輸液等で濡れて圧力が測定できていない場合には、血液回路を新品に交換してください。



### ご案内

疎水性エアフィルタの取り付け手順のシールが必要な場合は、お近くの事業所までお問合せください。


### TPフィルタ取付手順



## 「脱血不良」警報発生時の対応について【ACH-Σシリーズ】


「脱血不良」警報が発生した場合、解除ボタンを押す前に根本原因の特定と除去に努めてください。

### 「脱血不良」警報 原因と対策

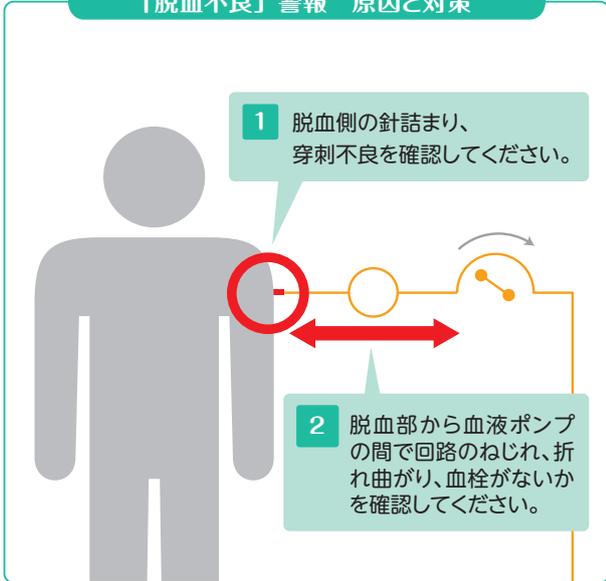

### 確認

脱血不良の根本原因を取り除かず解除ボタンを複数回押した場合、抗凝固薬が過剰に注入される可能性があります。

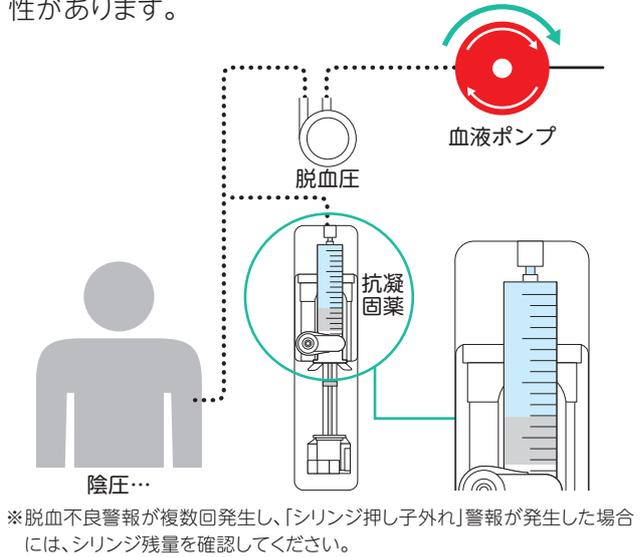

## 2025年8月1日より研修施設が新しくなります

旭化成メディカルは、血液浄化療法技術の普及・開発を通して患者さまのQOLの向上に貢献することを目的に研修施設を2007年に設立しました。この度、国内外の医療従事者が集い、知識と経験を共有しながら、医療のさらなる発展を推進するプラットフォームとして生まれ変わります。新名称には、患者様の明るい未来(ミライ)、ライフへ繋がる安全・安心の技術を高める施設(基盤:ベース)という意味を込めています。

新名称: MILIFE BASE (ミライフ ベース)

新住所: 東京都千代田区神田小川町3丁目2-1  
CIRCLES神田小川町 12階

### 技術研修

弊社装置の保守管理に関する技術が習得できる研修です。本研修では、取扱注意等の情報提供、装置の動作説明、定期点検に関する講義と実習を行います。

対象: 臨床工学技士、医療機器安全管理責任者が指名した医療従事者  
※研修対象機種を所有しており、基本的な操作を習得している方

### 操作研修

アフレスシ療法を安全に施行するために必要な知識を習得できる研修です。本研修では、使用するデバイスの特性、装置の機能、装置操作に関する注意点などの講義と実習を行います。

対象: 医師、臨床工学技士、看護師



アクセス ●「小川町」駅 徒歩2分 ●JR「御茶ノ水」駅 徒歩7分  
●「神保町」駅 徒歩7分



ACH-Σは旭化成メディカル株式会社の登録商標です。

## 旭化成メディカル株式会社

〒101-8101  
東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング  
TEL: 03-3296-3723  
www.asahikasei-medical.co.jp

